

EXETRON 606

エグゼトロン 606

エグゼトロン 606とは?

エグゼトロン 606は、吸引6チャンネルを搭載した理学診療用器具です。
豊富な機能と使いやすさを追求いたしました。



幅広い治療5つの出力波形

治療時間や、インターバルなどの組み合わせで、幅広い治療を行うことができます。

WAVE A



ランダム感覚の波形です。

WAVE B



1秒間に2拍の波形です。

WAVE C



0.6秒～1.1秒間に4拍の波形です。

WAVE D



1/f感覚のリズム波形です。

WAVE E



1秒間に8拍の波形です。

(出力波形イメージ図)

EMC* クラスB適合宣言!!

エグゼトロン 606は、基準値の厳しいクラスの規格(クラスB規格:住居、商用及び軽工業環境)に適合しています。
(クラスA規格:工業環境)



*EMCとは?

他の機器に妨害を与えるような電磁波を放出せず、また他の機器が発生する電磁波の影響を受けることなく、機器としての性能を発揮できる能力のことです。

エグゼトロン 606の使用目的、効能又は効果
経皮的に鎮痛及び筋萎縮改善に用いられる神経及び筋刺激を行います。



妊娠婦、心臓疾患のある方、伝染性の皮膚疾患のある部位、その他医師より特別の指示のある場合はその指示に従ってください。


EXETRON 606

エグゼトロン 606

医療の現場での使いやすさを考慮した仕様

■わかりやすい液晶表示

待機時やインターバル詳細設定など、機器の状態に応じた表示を行います。図形や文字で機器の状態が一目で分かります。

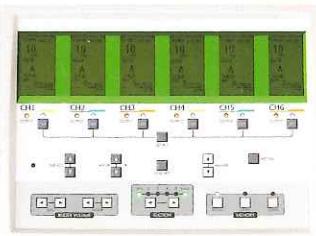


■大面積の予熱ヒーター

導子装着時の「冷たい」感を解消する予熱ヒーターを上下二段に設けました。大面積の予熱ヒーターには、6チャンネル全ての導子を置くことができます。



■インターバル詳細設定

インターバル動作における通電期間、休止期間、上昇期間、下降期間、上昇方法および下降方法を設定することができます。症状にあわせた設定で治療を行うことができます。

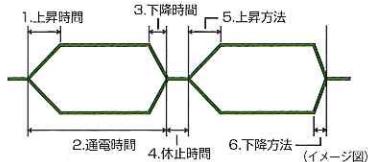

■ハンマーレベル

ハンマーの強さを0から10の範囲で選択することができます。症状にあわせたハンマーレベルで治療を行うことができます。

充実した吸引機能

出力終了時に吸引を自動停止させるか、継続させるかを選択することができます。吸引圧が自動で変化する「手揉みモード」を搭載しました。

充実した音による案内

出力中や出力終了時などはメロディで、排水の満水と排水容器の未収納は音声でお知らせします。出力中の音は2種類から、出力終了時の音は4種類から、好みにより選択することができます。

シンクロ機能

簡単な操作で治療時間や波形などの設定を他のチャンネルと同じにすることができます。複数のチャンネルを同じ状態にする場合に便利です。

多目的収納スペース

導子や付属品を収納できるスペースを設けました。高さがあるので、好みにあわせて自由に使用することができます。

メモリー機能

簡単な操作で設定した(全チャンネルの)状態の記憶および呼び出しを行うことができます(記憶は、ユーザー1と2を選択できます)。



■本体仕様

販売名 エグゼトロン 606
医療機器認証番号 222ALBZX00014000
一般的名称 低周波治療器
JMDNコード 35372000
医療機器の分類 管理医療機器
特定保守管理医療機器
電撃に対する保護の形式 クラスI機器
電撃に対する保護の程度 BF形装着部
定格電圧及び周波数 AC100V 50/60Hz
電源入力 240VA

■低周波出力部仕様

最大出力電圧 100Vp-p(500Ω負荷時)
最大出力電流 70mA rms(500Ω負荷時)
最大吸引圧 -35kPa
出力周波数 2.7kHz
出力波形 A,B,C,D,E
治療タイミング 1~99分及び連続
出力チャンネル数 6
安全装置 ゼロスタート方式
ストップスイッチ
電源ヒューズ 5A
出力ヒューズ 100mA

■寸法及び重量

寸法 450W(取っ手部含む 550W)×485D×1,250H(mm)
重量 55kg

※仕様及び規格はお断りなしに変更することがあります。※製品の色はカタログの色と異なる場合があります。

■製造販売業者・製造業者

 **Techno Link®**
株式会社テクノリンク www.techno-link.co.jp

本社 〒956-0804 新潟県新潟市秋葉区荻島2-30-15



TEL.0250-21-6251 FAX.0250-24-2151

■販売業者